


Staalbehandeling bij BDR opvolging van auto-antilichaampositieve eerstegraadsverwanten van patiënten met auto-immune diabetes



Bij voorkeur bloedafname op maandag t.e.m donderdag en onmiddellijke verzending volgens onderstaande richtlijnen

Analyse	Afname tube	Centrifugeren + Afscheiden in Transfertube	Transport t.a.v. Triercentrum UZ Brussel Laarbeeklaan 101 1090 Brussel
---------	-------------	--	---

Type1 diabetes Auto antilichaam panel	SERUM 4,9ml 	ja 	Verzending: <ul style="list-style-type: none">• Dag van bloedafname• Per post• Op kamertemperatuur
--	---	---	--

Type 1 diabetes Genetische merkers	EDTA 2,6ml 	neen neen	Verzending: <ul style="list-style-type: none">• Dag van bloedafname• Per post• Op kamertemperatuur
---------------------------------------	--	--------------	--

Staalbehandeling bij BDR opvolging van auto-antilichaampositieve eerstegraadsverwanten van patiënten met auto-immune diabetes



Indien bloedafname op vrijdag t.e.m zondag: verzending bij voorkeur op maandag, volgens onderstaande richtlijnen

Analyse

Afname tube

Centrifugeren
+
Afscheiden in Transfertube

Transport
t.a.v. Triercentrum UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel

Type1 diabetes
Auto antilichaam panel

SERUM 4,9ml



ja



Bewaren -20°C
Verzending:
• Per koerier
• Gekoeld met cool pack

Type 1 diabetes
Genetische merkers

EDTA 2,6ml



neen

neen

Bewaren -20°C
Verzending:
• Per koerier
• Gekoeld met cool pack

Staalbehandeling bij BDR opvolging van auto-antilichaampositieve eerstegraadsverwanten van patiënten met auto-immune diabetes



Bij voorkeur bloedafname op maandag t.e.m donderdag en onmiddellijke verzending volgens onderstaande richtlijnen

Analyse

Afname tube

Centrifugeren
+
Afscheiden in Transfertube

Transport
t.a.v. Triercentrum UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel

Type 1 diabetes
C-Peptide & Pro-Insuline

EDTA 2,6ml



ja



Verzending:

- Dag van bloedafname
- Per post
- Op kamertemperatuur

Type1 diabetes
Glucose

NaF 2,6 ml



ja



Verzending:

- Dag van bloedafname
- Per post
- Op kamertemperatuur

Staalbehandeling bij BDR opvolging van auto-antilichaampositieve eerstegraadsverwanten van patiënten met auto-immune diabetes



Indien bloedafname op vrijdag t.e.m zondag: verzending bij voorkeur op maandag, volgens onderstaande richtlijnen

Analyse

Afname tube

Centrifugeren
+
Afscheiden in Transfertube

Transport
t.a.v. Triercentrum UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel

Type 1 diabetes
C-Peptide & Pro-Insuline

EDTA 2,6ml



ja



Bewaren -20°C
Verzending:
• Per koerier
• Gekoeld met cool pack

Type1 diabetes
Glucose

NaF 2,6 ml



ja



Bewaren -20°C
Verzending:
• Per koerier
• Gekoeld met cool pack

Staalbehandeling bij BDR opvolging van auto-antilichaampositieve eerstegraadsverwanten van patiënten met auto-immune diabetes



Bij voorkeur bloedafname op maandag t.e.m donderdag en onmiddellijke verzending volgens onderstaande richtlijnen

Analyse	Afname tube	Centrifugeren + Afscheiden in Transfertube	Transport t.a.v. Triercentrum UZ Brussel Laarbeeklaan 101 1090 Brussel
---------	-------------	--	---

EDTA 2,6ml

Type 1 diabetes
HbA1c



neen

neen

Bewaren 4°C

Verzending:

- Per koerier
- Op kamertemperatuur

Staalbehandeling bij BDR opvolging van auto-antilichaampositieve eerstegraadsverwanten van patiënten met auto-immune diabetes



Indien bloedafname op vrijdag t.e.m zondag: verzending bij voorkeur op maandag, volgens onderstaande richtlijnen

Analyse

Afname tube

Centrifugeren
+
Afscheiden in Transfertube

Transport
t.a.v. Triercentrum UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel

Type 1 diabetes
HbA1c

EDTA 2,6ml



Geen verzending mogelijk na bewaring op 4°C langer dan 72 uur